

WiSM パルスオキシメータ

持ち運びに便利 コンパクトなパルスオキシメータ
シリコンカバー・ストラップ付

製品ページ



医療従事者の確認画面が出る場合は「はい」を押した後にもう一度読み込んでアクセスしてください。



酸素飽和濃度/脈拍強さ表示

脈拍数表示

管理医療

特定保守

商品コード	カラー	定価
日医-97611	ブルー	¥7,480 (税抜¥6,800)

ポイント1 指を挟めばすぐ測定開始できるかんたん仕様

ポイント2 暗いところでもはっきり見える赤色LED表示

ポイント3 連続使用時間30時間まで可能

ポイント4 指を抜くと自動で電源オフするエコ設計

ポイント5 安心の1年保証

付属品



電池 シリコンカバー ストラップ

測定適用範囲について

- 体重100kg以上の方は正しく測定できない場合がございます。
- 小児の場合、体重15kg以上であれば測定可能です。
- 指が細い場合、親指での測定も可能です。

仕様	
一般的名称	パルスオキシメータ
販売名	ユニコパルスオキシメータ<EMC適合>
医療機器認証番号	229AKBZX00070000
サイズ	61 x 36 x 32mm
重量	約60g (電池含む)
電源	単4電池 x 2
SpO2 設定値仕様	測定範囲 0%~100% (解像度 1%) 精度 70%~100% ±2%; 70%未満は規定なし
脈拍 設定値仕様	測定範囲 30bpm~250bpm (解像度1bpm) 精度 ±2bpm あるいは±2% いずれか大きいほう

使い方

- クリップ部分を開き、指を差し込みます
- 電源ボタンを1回押します。しばらくすると測定値が表示されます。
- 指を外すと測定値が消え、約5秒後に電源が自動で切れます。



電源ボタン



※清掃時は柔らかい布に消毒用アルコールなどを含ませて拭いてください

株式会社日本医療器研究所

取扱店 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24番11号
TEL:03-3834-3191 FAX:03-3831-8964

日進医療器株式会社

製造販売元 〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目4番2号
TEL:06-6223-0133 FAX:06-6203-4751