

SPR-SPC
機器本体SPR-01
キャンピングケース
(予備バッテリー収納可能)SPR-03
バッテリーパック
(使い捨て)SPR-04/04L
AED共通用電極パッド
(使い捨て)
販売名: 救急隊用電極パッド1
製造販売元: 13BX1X10153000012

■その他標準構成品

- 取扱説明書(本体)
- CPRマネキン
- 救急セット
- JRC 最新ガイドライン2020について
- CU-SPRT(AED訓練機)
- AED設置場所に関する登録について
- IPADシーユーSPR Link(スマートフォン)
- 取組ツール
- 救急文庫(本体・共通用電極パッド)
- 対応国産AEDマップ登録書
- IPADシーユーSPR Link(スマートフォン)
- AEDを用いた二次救急手帳登録システム

※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。



仕様	
販売名	IPADシーユーSPR 高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
電極パッド	共通用電極パッド(小学生~大人/未就学児) (一自回りの使い捨て)
出力エネルギー	小学生~大人用モード150J 未就学児用モード50J
波形	二相性逆形 a-cube Biphasic 傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整
バッテリー容量	DC12V/4.2Ah 使い切りバッテリーパック 設置から最大5分 設置環境、使用回数により異なる) 電気ショック200回以上(新品の場合)
セルフテスト	バッテリー装着時、毎日、毎週、4週毎 (AED本体、バッテリーパック、電極パッド)
保管期間	温度 0℃~50℃ 湿度 5%~95%
輸送条件	輸送条件: 振動のみ、電極パッドとバッテリーパックは含まない 温度: -20℃~60℃ 湿度: 5%~95%(結露しないこと)
耐用期間	8年
保証期間	通常5年(最大8年保証プラン有)
充電時間	・新しいバッテリーパック: 電気ショックが必要ですがという 音声ガイダンスが出てから3分以内 ・心電図解析の開始からの時間: 新しいバッテリーパックで10分 ・2回目以降の時間: CPR/心臓蘇生ガイダンスの終了から 6分以内
重量	230×240×70 W×D×H(mm) (IPADシーユーSPR Link: 230×270×70)
質量	2.0kg(バッテリーパック、電極パッドを含む) 2.6kg(IPADシーユーSPR Link)
メモ機能	5件のデータ保存が可能 (1分間隔で、最大15時間のイベント情報 ECG情報) PQ転送(USB×3)
ガイド機能	インジケータ/イラスト表示、心臓蘇生コーチング機能/ 心臓蘇生行為の有無表示
モード機能	小学生~大人用/未就学児用モード ボタンで切り替え
ステータスインジケータ	1つのステータスインジケータで3つの状態が確認可能 (電極パッドの期限および状態、バッテリー残量、機器のエラー有無)
ステータスランプ	3色(緑、黄、赤)のランプで機器の状態、消耗品期限が確認可能
防塵防水性能	IP68 IEC60529:2013
放電	機器は次のいずれかの場合に本体の内部にエネルギーを放電します。 ・電気ショックの実施時に傷病者の心電図が電気ショックを必要としない電図に変わった場合 ・充電の完了後、30分以内に電気ショックボタンを押さない場合 ・電源ボタンを1秒以上押し、機器をオフにした場合 ・傷病者から電極パッドを取り外した場合 または電極パッドコネクタを機器から取り外した場合 ・保護蓋のインピーダンスと電気ショックの適用範囲 (250~1750)の外の場合
振動	操作時 MIL-STD810G Fig5146E-1 randomを満了す スタンバイ時 MIL-STD810G Fig5146E-2 swept sine (helicopter)を満了す
RMS-Link 基本契約期間	通常5年(オプションで最大8年まで利用可能)
RMS-Link バッテリー	リチウム電池CR123A 交換目安 約2年(パナソニック製リチウム電池使用時)

※電気ショック及び充電作業は必ずお読みの上正しくおこなってください。

※注: 充電時の充電時間や充電率などは保証されません。充電に2時間かかります。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。

※AEDの設置場所: AED設置場所に関する登録についてお問い合わせください。一自回りの使い捨てです。



あなたに寄り添う新世代AED

IPAD CU-SPR



IPAD シーユーSPR
医療機器承認番号: 30300B2X00265000
一般社団法人医療従事者向け自動除颤器
JRC 蘇生ガイドライン2020準拠

製造販売業者 **株式会社 CU**

〒142-0042 東京都品川区豊5丁目7番8号
TEL. 03-6205-7385 FAX. 03-6205-7386
<https://www.japan-cu.com>

お問い合わせ先

販売業者 **KAMICO**

〒111-0051 東京都台東区根3-19-11 中越駅前ビル
TEL. 03-5821-5823 FAX. 03-3851-3511
<https://www.kamico.co.jp/>

誰もが安心して使える、高性能なAEDはここに 있습니다。

見やすいインターフェイス

ステータスインジケータ

正常な状態

エラー状態

○ 機器は正常であることを示しています。

✕ 機器に異常があることを示しています。

● バッテリーの残量を示しています。

● 電極パッドの期限、使用済み、期限切れ、またはエラー状態を示しています。

ステータスランプ

● 機器が正常の場合、緑色に点滅します。

● バッテリーのステータスインジケータが点滅状態、または電極パッドの有効期限が3ヶ月未満の場合、黄色に点滅します。

● 機器に異常がある場合、消耗品の期限が切れている場合、赤色に点滅します。

一目で機器の状態を確認する事ができます。1日に1回、自動で機器本体の状態、電極パッドの有効期限、導通性、バッテリー残量を調べるセルフテスト機能が付いています。

！ 日常点検を忘れずに！

AEDは救命活動のための救急機器です。
AEDを設置するに、いつでも使用できるように、AEDのインジケータやランプの有効期限などを日常から点検することが必要です。

モード切替ボタン(ボタン)



小学生以上の傷病者には、小学生～大人用モード、およそ6歳未満には未就学児用モードを選択します。

※電極パッドを貼った後でも、電極を剥がすと自動的にモード切替が可能です。
(あらかじめ傷病者の適切な対象モードを選択してください。)



小学生～大人 未就学児



選択したモードの傷病者の電極パッド貼付位置をイラストと光によってガイドします。



AEDの使い方

1 AEDの電源を入れる～モード選択



電源ボタンを長押しし、AEDの電源を入れます。
モード切替ボタンで、小学生～大人モード/未就学児モードを選択してください。
※デフォルトは小学生～大人モード

2 電極パッド貼付け～心電図解析



機器の底面にある電極パッドを取り出し、図のように傷病者にしっかりと貼り付けます。
電極パッドを傷病者に貼り付けると、機器は自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要か否かを判断します。

3 電気ショックを実施



電気ショックが必要な場合は、音声ガイドダンスに従い、点滅していただく。

安心の最大8年保証

AEDの設置先情報の登録

有効期限内の適切な消耗品交換

を行っていただいた機器には

最大8年のメーカー保証 付きます！



耐用期間8年間までメーカー保証！


※耐用期間を過ぎたAEDはご設置いただけません。古い機器は廃棄し、新しい機器と交換してください。
※上記イメージの交換時期は目安です。消耗品交換については有効期限内の早めの準備をお願いします。

遠隔監視システム(RMS-Link) ※オプション


- 機器の状態をアイコン別に確認
- マップ上にAEDの設置場所や使用場所を表示
- AEDの状態や有効期限をグラフで表示



- 複数のAEDを一括管理
- 設置されたAEDごとに詳細情報を表示

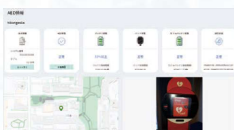

いつでもどこでもWEBやアプリで管理

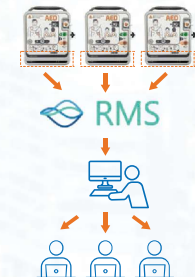

- セルフテスト結果の確認
- バッテリー残量確認
- 消耗品の有効期限管理
- AED耐用期間
- マップ上に位置情報を表示
- メールやSMS、アプリで通知
(AEDの稼働、使用済、消耗品切れ等)

※本サービスはオプションであり、ご利用の際は事前にアカウント登録が必要です。
詳しくは当社または担当代理店様からお問い合わせください。

高い防塵・防水性能



IP66 (IEC60529) を取得
● 防塵性能 IP6X
→ 粉塵が内部に入らない。
● 防水性能 IPX6
→ あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない。

オートボリュウム機能

80dB 90dB



使用者に適切な音声ガイドダンスが伝わるように、周りの騒音に合わせて自動で音量が上昇します。



（一社）日本AED製造者・中興・改良者団体連合会「耳マーク」の製・利用について承諾を得ています。

救命の連鎖

傷病者を見つけたら、日本救急協会ガイドラインで提唱されている、「救命の連鎖」の行動が必要です。



- 心停止の予防
- 早期認識と通報
- 一次救命処置(心臓蘇生)とAED
- 二次救命措置と集中治療